

Algemene richtlijnen Cicatrex drukkleding



Richtlijnen voor exacte maatname van een Cicatrex® armkous



Algemene richtlijnen

- De arm meten na ontzwellen.
- Voor een exacte meting dient u een flexibel meetlint en een bodymarker te gebruiken.
- Alle maten worden in de natuurlijke lichaamshouding van de patiënt gemeten.
- Teken naar mogelijkheid de omvang van de armkous in de schets in.
- Drukpelotten, Silon-TEX, extra openingen evenals extra maten, die door de maatnemer voor belangrijk worden gehouden, zijn in de schets in te voeren.

Richtlijnen t.b.v. meten

- De lengtemaat voor de armen wordt vanaf de pols genomen. Meet u daarbij steeds aan de buitenkant van de armen over de epicondylus lateralis.
- Voor een voorziening met een borstgordel of een BH-lus dient ook de schouderkap opgemeten te worden.

Verklaring van de symbolen

-  = circulaire maat
-  = lengte maat

Richtlijnen voor exacte maatname van een Cicatrex® handschoen



Algemene richtlijnen

- De hand meten na ontzwellen.
- Voor een exacte meting dient u een flexibel meetlint te gebruiken.
- Alle maten worden in de natuurlijke lichaamshouding van de patiënt gemeten.
- Teken naar mogelijkheid de omvang van de handschoen in de schets in.
- Drukpelotten, Silon-TEX, extra openingen alsmede extra maten, die door de maatnemer voor belangrijk worden gehouden, zijn in de schets in te voeren.

Richtlijnen t.b.v. meten

- De vingeromvang wordt bij het onderste gewricht en bij het bandage-einde gemeten.
- Geef bij iedere vinger de uitvoering open of gesloten aan.
- De handlengte wordt aan de binnenkant gemeten. Hiervoor wordt de afstand vanaf de vingerplooi tussen middelvinger-wijsvinger of tussen middelvinger-ringvinger (langste maat) tot de pols genomen.
- Mocht de manchet langer zijn dan tot de elleboog, gebruik dan het maatblad voor een armkous.

Verklaring van de symbolen

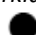



-  = circulaire maat
-  = lengte maat

Richtlijnen voor exacte maatname van een Cicatrex® kinband of hoofdbandage

Algemene richtlijnen

- Voor een exacte meting dient u een flexibel meetlint te gebruiken.
- Drukpelotten, Silon-TEX evenals extra maten, die door de maatnemer voor belangrijk worden gehouden, zijn in de schets in te voeren.

Verklaring van de symbolen

-  = maat voor vervaardiging van een kinband
-  = semicirculaire maat
-  = circulaire maat
-  = lengtemaat